



Täglich / nach jedem Gebrauch

Maske entsprechend der Gebrauchsanleitung zerlegen.



Die **Maskenteile** (ohne Kopfband) mit Spezialreiniger WILAsil (Art.Nr. 0965) oder mit warmen Wasser ca. 30°C und milder Seife per Hand reinigen.

> **NICHT** im Geschirrspüler oder in der Waschmaschine reinigen.

> **KEINE** aromatischen Lösungen oder Duftöle, Bleichmittel, stark riechende Produkte oder Alkohol zur Reinigung verwenden.



Luftauslassöffnungen mit einer weichen Bürste reinigen.



Alle Teile gründlich unter fließenden Wasser abspülen und vollständig an der Luft trocknen lassen > **NICHT** bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf der Heizung trocknen.



Wöchentlich



Das **Kopfband** nur per Hand mit milder Seife waschen. Dazu das Kopfband von der Maske trennen. Wenn das Kopfband neu ist, kann es zu Farbauswaschungen kommen. > **NICHT** bügeln!



Den **Atemschlauch** mit Spezialreiniger WILAsil (Art.Nr. 0965) oder mit warmen Wasser ca. 30°C und milder Seife per Hand reinigen. Anschließend gut abspülen und hängend trocknen lassen. (zB. hängend über der Duschwand)

Reinigen Sie den **Luftbefeuchter** wie rückseitig beschrieben.

Monatlich



Das Gehäuse des **Atemtherapiegerätes** mit Acryl-des Desinfektionstücher (Art.Nr. 4391) oder einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.



Den **Luftfilter** überprüfen und bei Bedarf gemäß der Gebrauchsanleitung auswechseln > Luftfilter ist **NICHT** waschbar!



HumidAir™ Luftbefeuchter

Entfernen Sie den Luftbefeuchter entsprechend der Gebrauchsanleitung vom Therapiegerät.

Sie sollten den Befeuchter **wöchentlich** reinigen:



Waschen Sie den Befeuchter in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. > **KEINE** aromatischen Lösungen oder Duftöle, Bleichmittel, stark riechende Produkte oder Alkohol zur Reinigung verwenden.



Spülen Sie den Befeuchter gut ab und lassen Sie ihn trocknen. > **NICHT** bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf der Heizung trocknen.



Der Befeuchter kann in der Spülmaschine (nur im oberen Korb) im Schon- oder Gläserspülgang gewaschen werden. Er sollte nicht bei Temperaturen über 65 °C gewaschen werden. > **OHNE** Dichtung - entfernen Sie diese vorab.

Öffnen Sie den Befeuchter und füllen Sie ihn bis zur maximalen Wasserstandsmarkierung mit Wasser, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen. Verwenden Sie dazu normales Leitungswasser (stark kalkhaltiges Wasser eventuell zuvor abkochen) bzw. destilliertes Wasser (Vorsicht: kein destilliertes Wasser aus dem Baumarkt).



Entleeren Sie den Befeuchter **täglich** und wischen Sie ihn mit einem sauberen Einwegtuch gründlich ab.

Lassen Sie ihn vor direktem Sonnenlicht und/oder Hitze geschützt trocknen.



Überprüfen Sie den Befeuchter regelmäßig auf Schäden:

Ersetzen Sie den Befeuchter, wenn er undicht ist, Risse aufweist oder trübe ist.

Ersetzen Sie die Dichtung, wenn diese Risse aufweist.

Entfernen Sie mögliche Kalkablagerungen mit Haushaltsentkalker (Essig, Zitronensäure, etc.)