


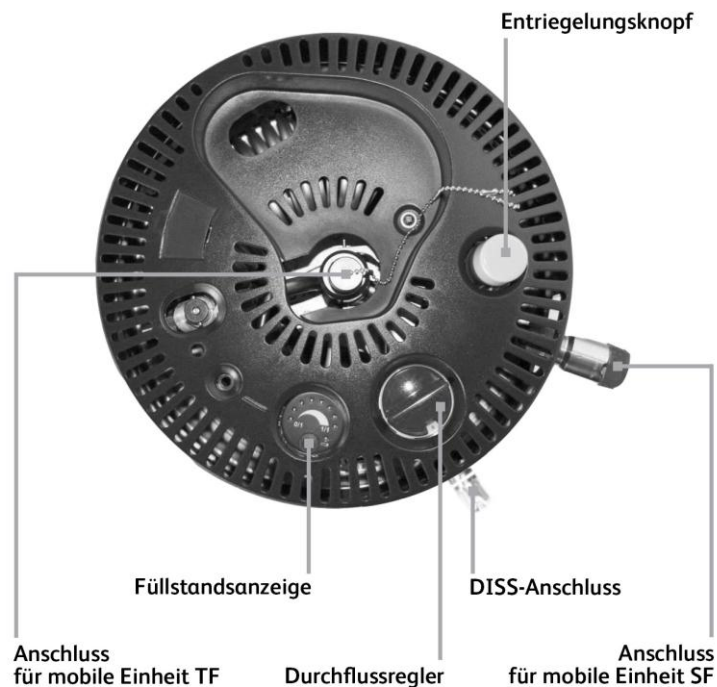

BEDIENELEMENTE	
Füllstandsanzeige	<ul style="list-style-type: none"> Durch Drücken des grünen Knopfes ist der aktuelle Füllstand ersichtlich. Das Gerät ist ganz voll, wenn alle Punkte / Balken leuchten. Das Gerät ist leer, wenn nur noch ein Punkt / Balken leuchtet. Informieren Sie Ihren Lieferanten umgehend, wenn nur noch drei Punkte / Balken leuchten, damit Sie auch am Wochenende genügend Sauerstoff haben! Leuchtet das Warnlicht neben dem Batteriesymbol, informieren Sie bitte Ihren Lieferanten bei der nächsten Lieferung.
DISS-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> Hier wird der Befeuchterbecher angeschlossen.
Durchflussregler	<ul style="list-style-type: none"> Durch Drehung am roten Durchflussregler ist die verordnete Sauerstoffzufuhr einzustellen. Die Angabe ist in Liter pro Minute.
Anschlüsse für Stroller	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befüllung der tragbaren Einheit wird diese an den jeweiligen Anschluss zur Obenbefüllung (TF) oder Seitenbefüllung (SF) gekoppelt.
Entriegelungsknopf	<ul style="list-style-type: none"> Die Benutzung ist nur bei Befüllung der mobilen Einheit von oben notwendig.



 VERWENDUNG DES LIBERATORS	
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Befeuchterbecher an den DISS-Anschluss anschließen. ▪ Nasenkanüle an den Befeuchterbecher anschließen. ▪ Drehen Sie den Durchflussregler auf die Ihnen verordnete Stufe. Der eingestellte Wert darf den verordneten Wert nicht überschreiten! ▪ Überprüfen Sie, ob es im Befeuchterbecher zur Blasenbildung kommt. Eine Blasenbildung bedeutet, dass vom Gerät Sauerstoff abgegeben wird. ▪ Legen Sie Ihre Nasenkanüle an. ▪ Stellen Sie den Regler auf „0“, wenn das Gerät nicht in Verwendung ist.
Verdampfung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es liegt eine natürliche Eigenverdampfungsrate von ~ 1 L/Tag vor.

 HANDHABUNG DES ZUBEHÖRS	
Befeuchterbecher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung einmal wöchentlich. ▪ Befüllung mit Sterilwasser oder abgekochtem Wasser (min. 3 Minuten abkochen). ▪ Sterilwasser nachfüllen, sobald der Füllstand die Minimum-Markierung erreicht. ▪ Der Befeuchterbecher sollte zumindest halbjährlich gewechselt werden.
Kondenswasserflasche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Um ein Überlaufen zu vermeiden, kontrollieren Sie täglich die Kondenswasserflasche. ▪ Zum Entleeren nehmen Sie die Flasche aus dem Haltebügel.

Wünschen Sie eine Bedienungsanleitung zum Gerät, kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam.