



BEDIENELEMENTE	
Durchflussregler	<ul style="list-style-type: none"> Durch Drehung des Durchflussreglers ist die verordnete Sauerstoffzufuhr einzustellen. Die Angabe ist in Liter pro Minute („C“-Modus“) bzw. in Stufen („D“-Modus). Das Gerät gibt, je nach Einstellung, den Sauerstoff konstant („C-Modus“) oder nur beim Einatmen („D-Modus“) ab. Helios Plus 300: C-Modus bis 0,75, D-Modus von 1 bis 4 Helios Marathon 850: C-Modus gekennzeichnet mit „C“, D-Modus mit „D“
Anschluss für die Nasenkanüle	<ul style="list-style-type: none"> Die Enden der Nasenkanüle werden an diese zwei Anschlüsse gekoppelt. Die Sauerstoffabgabe erfolgt nur durch den oberen Anschluss, der untere Anschluss erkennt die Einatemphase.
Anschluss zur Befüllung	<ul style="list-style-type: none"> Diesen Anschluss des Helios koppeln Sie an die passende Stelle Ihres Standgeräts.
Füllstandsanzeige: Federwaage	<ul style="list-style-type: none"> Zur Kontrolle des Füllstands heben Sie das Gerät am Riemen der Federwaage an. Das Gerät ist voll, wenn das Sichtfenster gänzlich „grün“ ausgefüllt ist.
Entlüftungsventil	<ul style="list-style-type: none"> Beim Füllvorgang muss dieses Ventil geöffnet werden. Nur dann ist eine Befüllung der tragbaren Einheit möglich.



 BEFÜLLUNG UND VERWENDUNG DER TRAGBAREN EINHEIT	
Befüllung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Füllanschluss des Standgeräts sowie der mobilen Einheit muss vor dem Füllen mit einem sauberen, trockenen und flusenfreien Tuch (z. B. Geschirrtuch) gereinigt werden, um ein Aneinanderfrieren der Geräte zu verhindern. ▪ Stellen Sie den Regler der mobilen Einheit auf „0“. ▪ Verbinden Sie die Anschlüsse der mobilen Einheit und des Standgeräts. Drücken Sie das Gerät nach unten. ▪ Öffnen Sie das Entlüftungsventil. Das zischende Geräusch ist normal! ▪ Sobald das Zischen unregelmäßig ist und weißer Dampf austritt, ist Ihre mobile Einheit vollständig befüllt. ▪ Zum Abnehmen der mobilen Einheit nehmen Sie diese wieder hoch. ▪ Wurde das Gerät zu voll gefüllt, warten Sie einige Zeit, bis genug Sauerstoff verdampft ist.
Die Geräte sind aneinander gefroren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warten Sie 30 Minuten, bevor Sie versuchen, die beiden Geräte zu trennen! ▪ Trennen Sie die Geräte nie gewaltsam!
Füllstandskontrolle (siehe Abbildung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Halten Sie das Gerät am Riemen in der Luft. ▪ Bringen Sie das Gerät in aufrechte Position, indem Sie dagegen drücken. ▪ Blicken Sie auf das Sichtfenster.
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warten Sie nach der Befüllung 15 Minuten, bevor Sie das Gerät verwenden. ▪ Befüllen Sie die mobile Einheit maximal einmal pro Tag!

 HANDHABUNG DES ZUBEHÖRS & ALLGEMEINES	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwenden Sie ausschließlich einen befeuchteten Lappen. Bei einer größeren Verschmutzung verwenden Sie eine kleine Menge Spülmittel. ▪ Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Gerät darf nur aufrecht, auf dem Rücken liegend sowie einer Position dazwischen gelagert werden.

Wünschen Sie eine Bedienungsanleitung zum Gerät, kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam.