



BEDIENELEMENTE	
Füllstandsanzeige: Federwaage	<ul style="list-style-type: none"> Um den Füllstand zu kontrollieren, heben Sie das Gerät an der Federwaage an. Das Gerät ist voll, wenn das Sichtfenster gänzlich „grün“ ausgefüllt ist.
Durchflussregler	<ul style="list-style-type: none"> Durch Drehung am roten Durchflussregler ist die verordnete Sauerstoffzufuhr einzustellen. Die Angabe ist in Stufen.
Anschluss zur Befüllung	<ul style="list-style-type: none"> Abhängig davon, ob Sie ein Gerät mit Ober- oder Seitenbefüllung benutzen, koppeln Sie diesen Anschluss an die passende Stelle Ihres Standgeräts.
Entlüftungsventil	<ul style="list-style-type: none"> Beim Füllvorgang muss dieses Ventil geöffnet werden. Nur dann ist eine Befüllung der tragbaren Einheit möglich.
Anschluss für die Nasenkanüle	<ul style="list-style-type: none"> Die Nasenkanüle wird an diesen Anschluss gekoppelt.
Batteriefach	<ul style="list-style-type: none"> Leuchtet das Warnlicht neben dem Batteriesymbol, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.



 BEFÜLLUNG UND VERWENDUNG DER TRAGBAREN EINHEIT	
Befüllung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Füllanschluss des Standgeräts sowie der mobilen Einheit muss vor dem Füllen mit einem sauberen, trockenen und flusenfreien Tuch (z. B. Geschirrtuch) gereinigt werden, um ein Aneinanderfrieren der Geräte zu verhindern. ▪ Stellen Sie den Regler der mobilen Einheit auf „0“. ▪ Verbinden Sie die Anschlüsse der mobilen Einheit und des Standgeräts. ▪ Öffnen Sie das Entlüftungsventil. Das zischende Geräusch ist normal! ▪ Bewegen Sie während des Füllvorgangs die mobile Einheit selbst sowie das Entlüftungsventil alle 30 Sekunden hin und her, um ein Festfrieren zu verhindern. ▪ Sobald das Zischen unregelmäßig ist und weißer Dampf austritt, ist Ihre mobile Einheit vollständig befüllt. ▪ Wurde das Gerät zu voll gefüllt, warten Sie einige Zeit, bis genug Sauerstoff verdampft ist.
Die Geräte sind aneinander gefroren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warten Sie 30 Minuten, bevor Sie versuchen, die beiden Geräte zu trennen! ▪ Trennen Sie die Geräte nie gewaltsam!
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Befüllen Sie die mobile Einheit maximal einmal pro Tag! ▪ Ersetzen Sie die Batterien, wenn das rote Warnlicht leuchtet. Solange dieses leuchtet, wird Sauerstoff abgegeben. ▪ Wenn Sie keine Batterien zur Verfügung haben, drehen Sie den Durchfluss-regler auf „CF“, um eine kontinuierliche Sauerstoffabgabe von 2 L/min zu erreichen. Dieser Modus ist zwar unabhängig von Batterien, beachten Sie aber, dass der Sauerstoffverbrauch steigt.

 HANDHABUNG DES ZUBEHÖRS	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nach jedem Gebrauch: Entnehmen Sie den Kondenswasserschwamm und drücken Sie diesen aus. Trocknen Sie den Schwamm vollständig, bevor Sie ihn wieder einsetzen. ▪ Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich einen befeuchteten Lappen. ▪ Das Gerät muss dabei vollständig entleert und entlüftet sein.

Wünschen Sie eine Bedienungsanleitung zum Gerät, kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam.