




|  BEDIENELEMENTE | |
|---|--|
| Netzschalter | <ul style="list-style-type: none"> Zum Ein- und Ausschalten des Geräts. |
| Einstellknopf und Flowmeter | <ul style="list-style-type: none"> Durch Drehen des Knopfes wird der Wert eingestellt. Der Wert des Sauerstoffdurchflusses wird am Flowmeter angezeigt. |
| LED-Leuchten | <ul style="list-style-type: none"> Grün: Die Sauerstoffreinheit ist auf Normalniveau. Gelb: Die Sauerstoffreinheit ist unterhalb des Normalniveaus, kontaktieren Sie bitte Vivisol. Rot: Das Gerät muss gewartet werden, kontaktieren Sie bitte Vivisol. |
| Sauerstoffauslass | <ul style="list-style-type: none"> Hier wird die Befeuchtungseinheit angebracht. |
| Luftfilter | <ul style="list-style-type: none"> Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Gerät und ist wesentlich für die Sauerstoffreinheit. Der Filter befindet sich an der Geräterückseite. |



|  VERWENDUNG DES SAUERSTOFFKONZENTRATORS | |
|---|--|
| Verwendung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Befestigen Sie die befüllte Befeuchtungseinheit am Sauerstoffauslass. ▪ Befestigen Sie die Nasenkanüle an der Befeuchtungseinheit. ▪ Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät führt einen Selbsttest durch und gibt einen akustischen Signalton ab. Es leuchten für kurze Zeit alle LEDs. ▪ Drehen Sie am Einstellknopf, um den Ihnen verordneten Wert einzustellen. Die Messkugel muss hierfür beim jeweiligen Wert am Flowmeter sichtbar sein. Der eingestellte Wert darf den verordneten Wert nicht überschreiten! ▪ Legen Sie die Nasenkanüle an. ▪ Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Verwendung ist, um eine Sauerstoffanreicherung zu verhindern. |

|  HANDHABUNG DES ZUBEHÖRS | |
|--|---|
| Gehäuse | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischen Sie das Gerät mindestens einmal wöchentlich mit einem befeuchteten Lappen ab. Ziehen Sie vorher den Netzstecker. |
| Befeuchtungseinheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tägliche Reinigung mit Spülmittel und/oder verdünntem Essig. |
| Luftfilter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigen Sie den Filter mindestens einmal wöchentlich, um eine höchstmögliche Sauerstoffreinheit zu erhalten. ▪ Waschen Sie den Filter mit Spülmittel und trocknen Sie den Filter anschließend. ▪ Nehmen Sie das Gerät niemals ohne oder noch feuchtem Filter in Betrieb! Das Gerät könnte beschädigt werden. |

Sollten Sie keine Bedienungsanleitung des Herstellers mitgeliefert bekommen haben, kontaktieren Sie bitte bei Bedarf unser Serviceteam unter 01 – 524 62 83.