


 <b>BEDIENELEMENTE</b>	
<b>Netzschalter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.</li> </ul>
<b>Volumenstrom-einstellregler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durch <b>Drehen</b> wird hier der Sauerstoffdurchfluss eingestellt.</li> <li>▪ Der Sauerstoffdurchfluss erhöht sich durch Drehung im Uhrzeigersinn.</li> </ul>
<b>LCD-Display</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Zeigt Informationen zum Betriebsstand des Geräts an.</b></li> </ul>
<b>Winkelanschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hier tritt der Sauerstoff aus.</li> <li>▪ Die Befeuchtungseinheit wird hier angebracht.</li> </ul>
<b>Grobstaubfilter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Gerät und ist <b>wesentlich für die Sauerstoffreinheit.</b></li> <li>▪ Der Filter befindet sich an der Geräterückseite unter der Abdeckung.</li> </ul>

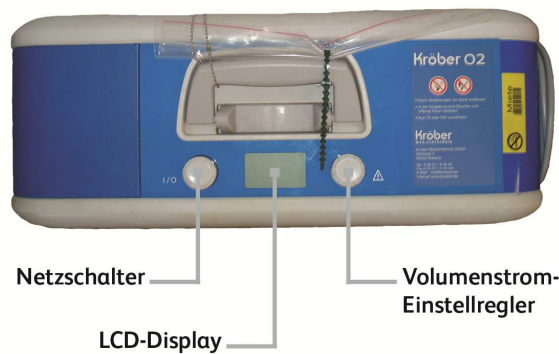

 <b>VERWENDUNG DES SAUERSTOFFKONZENTRATORS</b>	
<b>Verwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Befestigen Sie die befüllte Befeuchtungseinheit am Winkelanschluss.</li> <li>▪ Befestigen Sie die Nasenkanüle an der Befeuchtungseinheit.</li> <li>▪ <b>Schalten Sie das Gerät ein.</b> Das Gerät führt einen Selbsttest durch.</li> <li>▪ <b>Drücken</b> Sie auf den Einstellregler bis die Anzeige blinkt.</li> <li>▪ <b>Sobald ein akustisches Signal hörbar ist, können Sie durch Drehung des Reglers den Ihnen verordneten Wert einstellen. Der eingestellte Wert darf den verordneten Wert nicht überschreiten!</b></li> <li>▪ <b>Drücken Sie noch einmal auf den Regler, um den Wert zu übernehmen. Es ist erneut ein Tastenton hörbar, die Anzeige blinkt nicht länger.</b></li> <li>▪ Legen Sie die Nasenkanüle an.</li> <li>▪ <b>Schalten Sie das Gerät aus,</b> wenn es nicht in Verwendung ist, um eine Sauerstoffanreicherung zu verhindern.</li> </ul>
<b>Alarmsignale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gibt das Gerät ein Alarmsignal ab, kontaktieren Sie bitte Vivisol.</li> </ul>

 <b>REINIGUNG</b>	
<b>Gehäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wischen Sie das Gerät <b>mindestens einmal wöchentlich</b> mit einem befeuchteten Lappen ab. Ziehen Sie vorher den Netzstecker.</li> </ul>
<b>Befeuchtungseinheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tägliche Reinigung</b> mit Spülmittel und/oder verdünntem Essig.</li> </ul>
<b>Grobstaubfilter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ersetzen Sie alle 4 Wochen den Grobstaubfilter.</li> </ul>

Sollten Sie keine Bedienungsanleitung des Herstellers mitgeliefert bekommen haben, kontaktieren Sie bitte bei Bedarf unser Serviceteam unter 01 – 524 62 83.