



BEDIENELEMENTE	
Steuerungstafel	<ul style="list-style-type: none"> Hier werden Betriebsinformationen angezeigt.
Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Durch Betätigung wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.
Pfeiltasten	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einstellen der verordneten Sauerstoffmenge.
Flow-Modus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Je nach Einstellung gibt das Gerät kontinuierlich oder nur beim Einatmen Sauerstoff ab. In letzterem Fall leuchtet die Anzeige grün.
Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> Hier wird die Flowrate (= Sauerstofffluss) angezeigt.
Alarmanzeigen	<ul style="list-style-type: none"> Gelb: Geringe Warnstufe. Gelb, blinkend: Mittlere Warnstufe. Rot: Hohe Warnstufe. Kontaktieren Sie Vivisol, wenn eine Alarmanzeige leuchtet.
Akkusymbol	<ul style="list-style-type: none"> Gibt den Ladungszustand des Geräts an. Je nach Gerät (Eclipse II, III oder V) unterscheidet sich die Anzeige geringfügig.
Symbol „Stromkabel“	<ul style="list-style-type: none"> Befindet sich rechts von den Pfeiltasten. Wird das Gerät ordnungsgemäß an eine externe Stromquelle angeschlossen, leuchtet dieses.
Auslassventil	<ul style="list-style-type: none"> Hier tritt der Sauerstoff aus, die Sauerstoffkanüle wird hier angebracht.
Zuluftfilter	<ul style="list-style-type: none"> Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Gerät und ist wesentlich für die Sauerstoffreinheit. Dieser befindet sich an der Geräterückseite.



 VERWENDUNG DES SAUERSTOFFKONZENTRATORS	
Achtung!	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Während das Gerät am Stromnetz (AC) hängt, wird der Akku geladen. ▪ Der Akku ist wieder aufladbar. Das Aufladen kann bis zu 5 Stunden dauern. ▪ Wollen Sie das Gerät im Auto (DC) betreiben, starten Sie zuerst das Fahrzeug. Befestigen Sie das Kabel am Gerät und danach an der Steckdose. Beachten Sie, dass das Gerät in Abhängigkeit von Modell und Einstellungswerten unter Umständen nicht geladen wird und je nach Modell konstant max. 2 bzw. 3 Liter pro Minute abgibt.
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Befestigen Sie die Nasenkanüle am Sauerstoffauslassventil bzw. an der Befeuchtungseinheit. ▪ Schalten Sie das Gerät durch längeres Drücken der Ein / Aus Taste ein, es folgt ein Selbsttest. ▪ Die volle Leistung ist erreicht, sobald nur noch die grüne Leuchte leuchtet. ▪ Drücken Sie die Flow-Modus-Taste bzw. die Pfeiltasten, um den Ihnen verordneten Wert einzustellen. Die Einstellungen müssen der ärztlichen Verordnung entsprechen! ▪ Legen Sie die Nasenkanüle an. ▪ Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Verwendung ist, indem Sie die Ein- / Aus-Taste für zwei Sekunden gedrückt halten.

 REINIGUNG	
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischen Sie das Gerät mindestens einmal wöchentlich mit einem befeuchteten Lappen ab. Ziehen Sie vorher den Netzstecker.
Befeuchtungseinheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tägliche Reinigung mit Spülmittel und/oder verdünntem Essig.
Grobstaubfilter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigen Sie den Filter mindestens einmal wöchentlich, um eine höchstmögliche Sauerstoffreinheit zu erreichen. ▪ Waschen Sie den Filter mit Spülmittel. Trocknen Sie den Filter anschließend. ▪ Nehmen Sie das Gerät niemals ohne oder mit noch feuchtem Filter in Betrieb, das könnte das Gerät beschädigen!

Zusätzliche **Sicherheitsrichtlinien** bei Verwendung des Eclipse

- ➔ Achten Sie beim Transport auf eine ausreichende Sicherung!
- ➔ Achten Sie darauf, dass der Akku nicht beschädigt wird.
- ➔ Greifen Sie nie ins Akkufach, wenn das Gerät von einer externen Stromquelle betrieben wird.
- ➔ Trennen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Wand und erst danach das Netzteil vom Eclipse.
- ➔ Das Gerät darf niemals Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden.
- ➔ Beachten Sie, dass das Gerät durch eine Gleichstromquelle möglicherweise nicht geladen wird!
- ➔ Kontaktieren Sie zeitgerecht Ihre Fluglinie, wenn Sie eine Flugreise unternehmen möchten.

Detaillierte Informationen Ihren Eclipse betreffend entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanleitung des Herstellers. Sollten Sie keine Bedienungsanleitung des Herstellers mitgeliefert bekommen haben, kontaktieren Sie bitte bei Bedarf unser Serviceteam unter 01 – 524 62 83.