

 <b>BEDIENELEMENTE</b>	
<b>Zufuhrregler &amp; Sauerstoffzufuhr-anzeige</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es gibt <b>drei Zufuhreinstellungen</b>, wobei die jeweilige Taste (1, 2 oder 3) der Zufuhrmenge entspricht (1, 2 bzw. 3 Liter pro Minute).</li> <li>Über den Tasten (1, 2 bzw. 3) leuchtet bei jedem Atemzug eine grüne LED.</li> </ul>
<b>Taste für die eingebaute Batterie &amp; Anzeige des Ladezustands</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Druck auf <b>Taste „BATT“</b> leuchten die LED-Leuchten entsprechend des <b>Ladezustands</b> auf.</li> <li>Das Laden der Batterie erfolgt durch Anschluss an eine externe Stromquelle. Das Gerät ist <b>vollständig geladen, wenn alle 4 LEDs aufleuchten</b>.</li> </ul>
<b>Alarmanzeige / Wartungs-anzeige</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gelbe LED leuchtet konstant:</b> Wartung erforderlich.</li> <li><b>„25% BATT“ blinkt, kurze Signaltöne:</b> Batterie schwach. In diesem Fall schließen Sie das Gerät binnen zwei Minuten an eine externe Stromquelle an.</li> <li><b>Rote LED leuchtet konstant, konstanter Signalton:</b> Fehlende Inhalation. In diesem Fall überprüfen Sie den richtigen Sitz der Nasenkanüle bzw. den Anschluss der Kanüle ans Gerät.</li> <li><b>Rote LED leuchtet konstant, schneller akustischer Alarm:</b> Allgemeine Störung. Die erzeugte Sauerstoffkonzentration ist nicht ausreichend.</li> <li><b>Rote LED blinkt, schneller akustischer Alarm:</b> Leistungsfähigkeit überschritten. Vermutlich aufgrund einer erhöhten Atemfrequenz ist die erzeugte Sauerstoffkonzentration nicht ausreichend.</li> </ul>
<b>Sauerstoffausgang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hier wird die Nasenkanüle angebracht.</li> </ul>
<b>Luftzufuhr, Filter-abdeckung, Luftausgang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Luft wird hier angesaugt und gefiltert.</li> <li>Die Öffnungen müssen unbedingt frei gehalten werden.</li> </ul>
<b>Stromanschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wechselstromnetzteil:</b> Versorgung des Geräts sowie der Batterie mit Strom.</li> <li><b>Gleichstromnetzteil:</b> Versorgung des Geräts sowie der Batterie mit Strom.</li> </ul>
<b>Batteriegurt „AirBelt“</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der AirBelt wird um die Hüften angelegt und gemeinsam mit der externen Batterie betrieben.</li> <li>Zum Laden des Batteriegurts wird dessen Netzkabel mit dem <b>Wechselstromnetzteil</b> und dieses mit einer externen Stromquelle verbunden.</li> </ul>

## Zusätzliche **Sicherheitsrichtlinien** bei Verwendung des FreeStyle Sauerstoffkonzentrators

- ➔ Der FreeStyle darf bei Regen nicht ungeschützt betrieben werden.
- ➔ Wird der FreeStyle im Auto benutzt oder geladen, muss der FreeStyle in jedem Fall vor dem Starten an die Stromquelle geschlossen werden.
- ➔ Nach Abstellen des Motors ist das Gerät von der Stromquelle zu trennen.
- ➔ Das Gerät darf niemals benutzt werden, wenn es sich im Kofferraum befindet.
- ➔ Kontaktieren Sie zeitgerecht Ihre Fluglinie, wenn Sie eine Flugreise unternehmen möchten.



 <b>VERWENDUNG DES SAUERSTOFFKONZENTRATORS</b>	
<b>Allgemeines</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es wird empfohlen, die Batterie <b>möglichst häufig aufzuladen</b>, auch, wenn die Batterie nur teilweise entladen ist.</li> </ul>
<b>Verwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zum Einschalten</b> drücken Sie entsprechend Ihrer ärztlichen Verordnung die Taste 1, 2 oder 3. Es leuchtet die <b>grüne LED-Leuchte</b>. <b>Die Einstellungen müssen der ärztlichen Verordnung entsprechen!</b></li> <li>Nach dem Ertönen eines akustischen Alarmsignals ist der FreeStyle betriebsbereit, dies dauert etwa 2 Minuten.</li> <li>Legen Sie die Nasenkanüle an.</li> <li><b>Schalten Sie das Gerät aus</b>, wenn es nicht in Verwendung ist, indem Sie erneut die Taste 1, 2 oder 3 (jene, über welche die LED leuchtet) drücken.</li> </ul>

 <b>REINIGUNG</b>	
<b>Gehäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wischen Sie das Gerät <b>mindestens einmal wöchentlich</b> mit einem befeuchteten, fusselfreien Lappen ab. Ziehen Sie vorher den Netzstecker.</li> <li>Achten Sie darauf, dass der Sauerstoffausgang frei von Staub oder Wasser bleibt.</li> </ul>
<b>Befeuchtungseinheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tägliche Reinigung</b> mit Spülmittel und/oder verdünntem Essig.</li> </ul>
<b>Filter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie den Filter <b>zumindest einmal wöchentlich</b>, um eine höchstmögliche Sauerstoffreinheit zu erreichen.</li> <li>Dazu wird dieser aus dem Filterhalter ausgebaut und mit warmem Seifenwasser ausgewaschen.</li> <li>Der Filter muss <b>vollständig trocken</b> sein, bevor er wieder eingesetzt wird.</li> <li><b>Nehmen Sie das Gerät niemals ohne oder noch feuchtem Filter in Betrieb, das könnte das Gerät beschädigen!</b></li> </ul>

Sollten Sie keine Bedienungsanleitung des Herstellers mitgeliefert bekommen haben, kontaktieren Sie bitte bei Bedarf unser Serviceteam unter 01 – 524 62 83.