


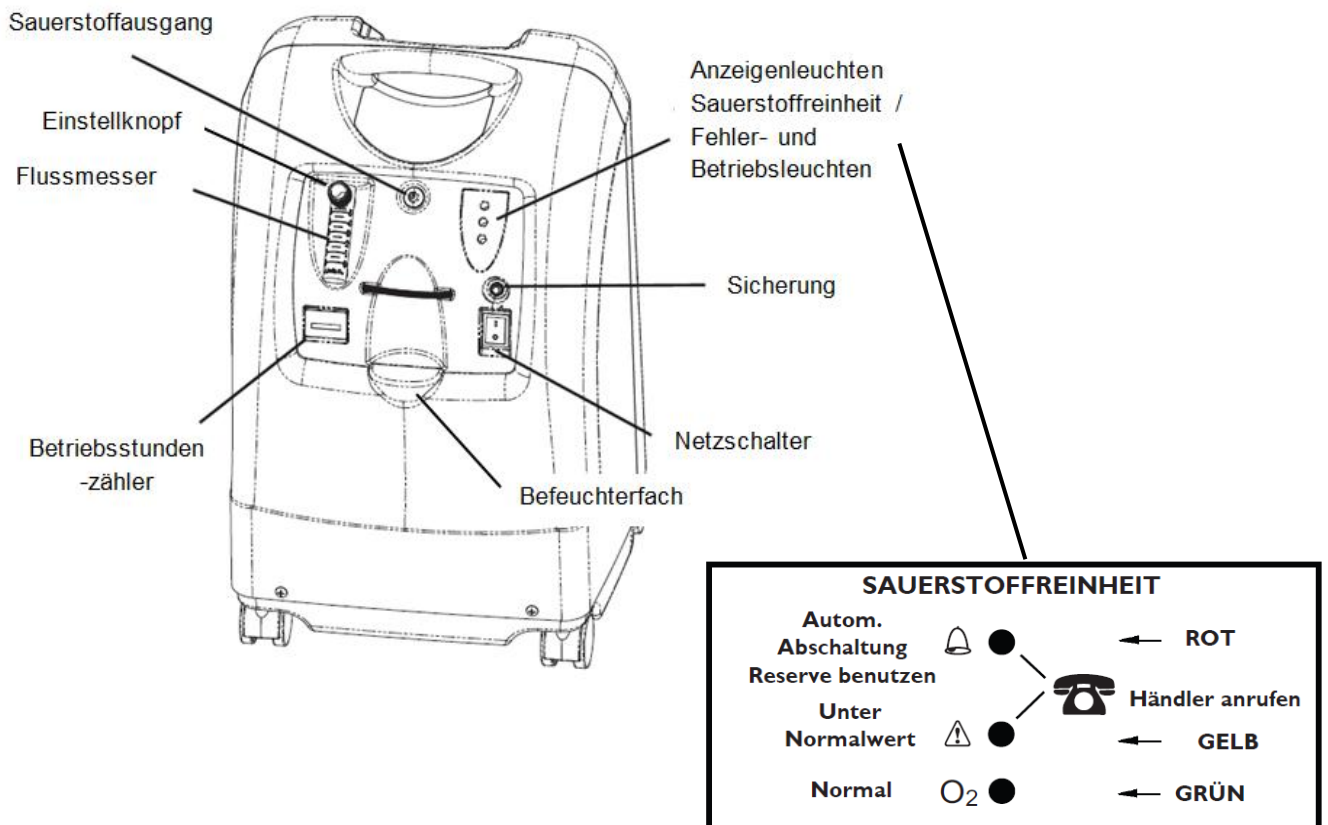

BEDIENELEMENTE	
Netzschalter	<ul style="list-style-type: none"> Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
Einstellknopf und Flussmesser	<ul style="list-style-type: none"> Durch Drehen des Einstellknopfes kann der verordnete Durchflusswert eingestellt werden. Der eingestellte Wert des Sauerstoffdurchflusses wird am Flussmesser angezeigt.
Anzeigenleuchten	<ul style="list-style-type: none"> Grün: Normalbetrieb Gelb: Kontaktieren Sie bitte Vivisol! Der Konzentrator kann weiter betrieben werden, sofern Vivisol keine anderen Anweisungen gibt. Rot: Kontaktieren Sie bitte Vivisol. Das Gerät darf nicht mehr betrieben werden.
Sauerstoffausgang	<ul style="list-style-type: none"> Hier wird der Befeuchterbecher-Adapterschlauch angebracht.



 VERWENDUNG DES SAUERSTOFFKONZENTRATORS	
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. ▪ Befestigen Sie den Befeuchter-Adapterschlauch am Deckel Ihrer Befeuchterflasche durch Drehen der Flügelmutter. ▪ Befüllen Sie die Befeuchterflasche. Achtung: nicht über die vom Hersteller vorgegebene Maximummarkierung befüllen. ▪ Bringen Sie die Befeuchterflasche im Befeuchterfach an und sichern Sie sie mit dem Gummizug. ▪ Befestigen Sie die den Befeuchter-Adapterschlauch am Sauerstoffauslass. ▪ Befestigen Sie die Nasenkanüle am Befeuchtungsbecher. ▪ Stellen Sie den Netzschalter auf die Position EIN. Ein akustischer Alarm ertönt und alle LEDs am Bedienfeld leuchten für kurze Zeit auf. ▪ Drehen Sie am Einstellknopf, um den Ihnen verordneten Wert einzustellen. Die Messkugel muss hierfür beim verordneten Wert am Flussmesser sichtbar sein. Der eingestellte Wert darf den verordneten Wert nicht überschreiten! ▪ Legen Sie die Nasenkanüle an. ▪ Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Verwendung ist, um eine Sauerstoffanreicherung zu verhindern.

 HANDHABUNG DES ZUBEHÖRS	
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei Bedarf reinigen Sie das Gerät mit mildem Haushaltsreiniger und einem abriebfreien Tuch oder Schwamm. Ziehen Sie vorher den Netzstecker.
Befeuchtungseinheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tägliche Reinigung mit Seifenwasser und einer Essiglösung (10 Teile Wasser, 1 Teil Essig). Anschließend mit heißem Wasser gründlich ausspülen.

Detaillierte Informationen zur korrekten Handhabung Ihres Geräts entnehmen Sie bitte der beigelegten Bedienungsanleitung des Herstellers. Sollten Sie keine Bedienungsanleitung des Herstellers mitgeliefert bekommen haben, kontaktieren Sie unser Serviceteam unter 01 – 524 62 83.